

Instrucciones para el pie Trailblazer™ MA

QUÉ HAY EN LA CAJA


- Pie Trailblazer MA
- Cubierta de pie de actividad intensa
- Calceta Spectra Sock
- Juego de aros para flexión
- Instrucciones

INSTALACIÓN

Conecte un componente receptor de pirámide de su elección al pie Trailblazer MA. Apriete los tornillos de fijación de acuerdo con las especificaciones de torque y del adhesivo para tornillos proporcionadas por el fabricante del receptor de pirámide.


ALINEACIÓN

Deslice el pie de 6 a 13 mm (1/4 a 1/2 pulgadas) hacia adelante, desde donde el pie y el tobillo estarían normalmente en una alineación estándar. 10 mm (3/8 de pulgada) hacia adelante es un buen punto de partida.

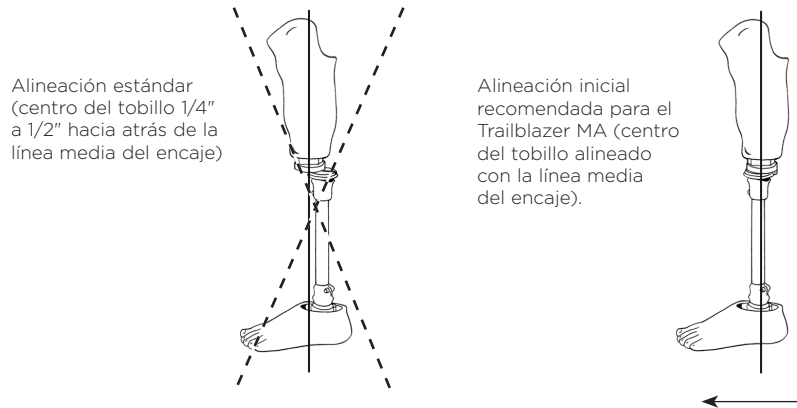

CAMBIO DEL TALÓN

- Afloje los dos tornillos que se muestran en la imagen de la derecha.
- Retire el talón.
- Inserte el nuevo talón.
- Aplique Loctite 242 (o un producto equivalente) a los tornillos.
- Apriete los tornillos a 5 libras-pie (6.8 Nm).

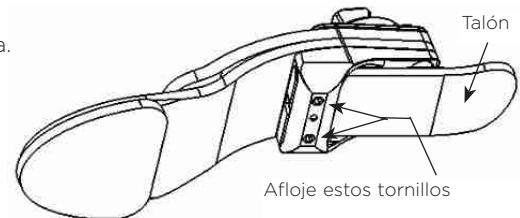

CAMBIO DEL ARO PARA FLEXIÓN

El pie Trailblazer MA cuenta con un aro para flexión que controla la cantidad de movimiento multiaxial que tiene el tobillo. Hay tres niveles de movimiento disponibles:

- El aro para flexión que proporciona la menor cantidad de movimiento tiene el orificio interior de menor tamaño (2.5 cm / 1 pulgada).
- El aro para flexión que proporciona la mayor cantidad de movimiento tiene el orificio interior de mayor tamaño (2.7 cm / 1 1/16 pulgadas).
- El aro para flexión que proporciona una cantidad media de movimiento tiene un diámetro de 2.6 cm / 1 1/32 pulgadas.

NO UTILICE EL PIE TRAILBLAZER MA SIN UN ARO PARA FLEXIÓN INSTALADO.

WillowWood®

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
Teléfonos 740.869.3377/800.848.4930
Fax 740.869.4374 www.willowwoodco.com
Patente www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents




Ohio Willow Wood Company B.V.
Keizersgracht 62/64
1015 CS Amsterdam
Países Bajos



PN-1961-D SPA 20 DE MAYO DE 2014

Para ajustar la cantidad de movimiento multiaxial, remplace el aro para flexión de la siguiente forma:

1. Desconecte el receptor de la pirámide de acoplamiento del pie.
2. Levante y retire la cúpula de pirámide del tobillo.
3. Retire el aro para flexión del tobillo.
4. Inserte el aro para flexión nuevo. **Haga la instalación con el lado plano hacia abajo.**
5. Vuelva a instalar la cúpula de pirámide.
6. Vuelva a instalar el receptor de pirámide de acoplamiento.
7. Ajuste los tornillos de fijación en el receptor de la pirámide de acoplamiento de acuerdo con las especificaciones de torque y de adhesivo para tornillos del fabric

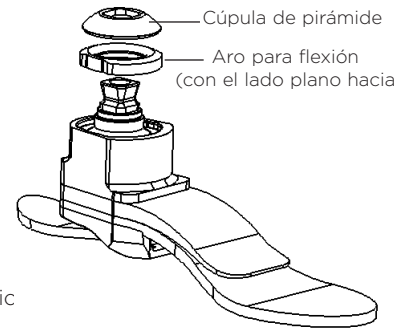

SI EXPONE EL PIE TRAILBLAZER MA A ARENA O AGUA SALADA:

1. Retire la cubierta del pie y la calceta Spectra Sock.
2. Limpie la arena.
3. Limpie el pie Trailblazer MA, la cubierta del pie y la calceta Spectra Sock con agua y jabón de tocador.
4. Permita que la cubierta del pie y la calceta Spectra Sock se sequen antes de volver a colocarlas.

ADVERTENCIA DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE

La advertencia de asesoramiento para el paciente le permite a usted, el médico protésico, notificar de forma eficaz a sus pacientes sobre las limitaciones de los componentes de su prótesis, así como sobre la necesidad de controlar su peso y sus niveles de actividad. Revise la advertencia de asesoramiento para el paciente con él al momento de entregarle una prótesis de pie Trailblazer MA. El paciente y el médico protésico deben firmar la advertencia de asesoramiento para el paciente con el fin de reconocer que ha sido revisada y comprendida por ambas partes. Entregue una copia firmada al paciente y guarde una copia en el archivo de este.

Si el peso o el nivel de actividad del paciente aumentan después de recibir una prótesis de pie Trailblazer MA, el paciente debe comunicarse inmediatamente con el médico protésico para determinar si es necesario reemplazar componentes. Si un paciente continúa usando una prótesis de pie Trailblazer después de subir de peso y/o aumentar su nivel de actividad, el pie puede fallar y existe la posibilidad de que el paciente sufra lesiones graves.

Para garantizar que se hayan seleccionado los componentes correctos para cada paciente, el médico protésico debe pesarlo en básculas en su consultorio. No debe basarse en los cálculos del paciente sobre su propio peso. Indíquelo al paciente que controle su peso semanalmente para asegurarse de que permanece en un rango apropiado para los componentes protésicos que se están utilizando.

GARANTÍA

La garantía del pie Trailblazer MA tiene una vigencia de 36 meses a partir de la fecha de facturación y la garantía de la cubierta del pie tiene una vigencia de 9 meses a partir de la fecha de facturación. El uso del pie Trailblazer MA en personas con amputaciones cuyo peso corporal modificado sea superior a 115 kg (250 libras) o que realicen actividad física extremadamente exigente y abusiva va en contra de las recomendaciones de WillowWood y anulará la garantía de 36 meses. El peso corporal modificado se define como el peso de la persona amputada más cualquier carga que lleve consigo. Las "actividades extremadamente exigentes y abusivas" se definen como actividades como paracaidismo, karate y judo; actividades que pudieran ocasionar lesiones en los pies naturales de una persona y actividades que expongan a la prótesis a agentes corrosivos como el agua salada.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA

WillowWood garantiza que, al momento de la entrega, cada producto fabricado tendrá calidad profesional y estará sustancialmente libre de defectos. WILLOWWOOD NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, Y NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR. Esta garantía se anulará inmediatamente en el momento en que se combinen nuestros productos con otros materiales o de tal forma que se modifique la naturaleza de nuestros productos. El único remedio es el reemplazo de los productos o el otorgamiento de crédito para los productos. La responsabilidad de WillowWood no excederá el precio de compra del producto. WillowWood no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial.

RETENCIÓN DE DERECHOS DE WILLOWWOOD

WillowWood conserva todos los derechos de propiedad intelectual reflejados o incorporados en sus productos físicos, independientemente de la transferencia de los productos físicos a cualquier otra parte o partes.