

# Instrucciones para el pie SACH con pirámide de titanio de WillowWood

## QUÉ HAY EN LA CAJA

Pie SACH con pirámide de titanio de WillowWood  
3 insertos de talón (suave, medio y firme)  
Instrucciones  
Advertencia de asesoramiento para el paciente

## MODIFICACIÓN DEL PIE

La cubierta de espuma de uretano puede lijarse ligeramente sin que esto afecte la resistencia. No exponga los componentes internos del pie, ya que esto puede reducir su integridad estructural.

## EXPOSICIÓN AL AGUA

Esencialmente, el pie SACH con pirámide de titanio de WillowWood es resistente al agua, siempre que no tenga grietas abiertas y no se haya lijado ninguna parte del pie. No se recomienda sumergirlo completamente en agua.

## INSERTOS DE TALÓN

Instale los insertos de talón presionándolos en el hueco en la superficie inferior del pie. No se requiere usar adhesivo para fijarlo de forma definitiva. No utilice el pie sin haberle colocado un inserto de talón.

## ADVERTENCIA DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE

La advertencia de asesoramiento para el paciente le permite a usted, el médico protésico, notificar de forma eficaz a sus pacientes sobre las limitaciones de los componentes de su prótesis, así como sobre la necesidad de controlar su peso y sus niveles de actividad. Revise la advertencia de asesoramiento para el paciente con él al momento de entregarle una prótesis con un pie SACH con pirámide de titanio de WillowWood. El paciente y el médico protésico deben firmar la advertencia de asesoramiento para el paciente con el fin de reconocer que ha sido revisada y comprendida por ambas partes. Entregue una copia firmada al paciente y guarde una copia en el archivo de este.

Si el peso o el nivel de actividad del paciente aumentan después de recibir una prótesis con un pie SACH con pirámide de titanio de WillowWood, el paciente debe comunicarse inmediatamente con el médico protésico para determinar si es necesario reemplazar componentes. Si un paciente continúa usando una prótesis con un pie SACH con pirámide de titanio de WillowWood después de subir de peso y/o aumentar su nivel de actividad, el pie puede fallar y existe la posibilidad de que el paciente sufra lesiones graves.

Para garantizar que se hayan seleccionado los componentes correctos para cada paciente, el médico protésico debe pesarlo en básculas en su consultorio. No debe basarse en los cálculos del paciente sobre su propio peso. Indíquelo al paciente que controle su peso semanalmente para asegurarse de que permanece en un rango apropiado para los componentes protésicos que se están utilizando.

## GARANTÍA

La garantía del pie SACH con pirámide de titanio de WillowWood tiene validez por un año a partir de la fecha de facturación. El uso del pie SACH con pirámide de titanio de WillowWood en personas con amputaciones cuyo peso corporal ajustado sea superior a 113 kg (250 libras) o que realicen actividad física extremadamente exigente y abusiva va en contra de las recomendaciones de WillowWood y anulará la garantía de un año. El peso corporal ajustado se define como el peso de la persona amputada más cualquier carga que lleve consigo. Las "actividades extremadamente exigentes y abusivas" se definen como actividades como paracaidismo, karate y judo; actividades que pudieran ocasionar lesiones en los pies naturales de una persona y actividades que expongan a la prótesis a agentes corrosivos como el agua salada.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA

WillowWood garantiza que, al momento de la entrega, cada producto fabricado tendrá calidad profesional y estará sustancialmente libre de defectos. WILLOWWOOD NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, Y NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR. Esta garantía se anulará inmediatamente en el momento en que se combinen nuestros productos con otros materiales o de tal forma que se modifique la naturaleza de nuestros productos. El único remedio es el reemplazo de los productos o el otorgamiento de crédito para los productos. La responsabilidad de WillowWood no excederá el precio de compra del producto. WillowWood no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial.

## RETENCIÓN DE DERECHOS DE WILLOWWOOD


WillowWood conserva todos los derechos de propiedad intelectual reflejados o incorporados en sus productos físicos, independientemente de la transferencia de los productos físicos a cualquier otra parte o partes.

**WillowWood**®

The Ohio Willow Wood Company  
15441 Scioto Darby Road  
Mt. Sterling, OH 43143  
Teléfonos 740.869.3377/800.848.4930  
Fax 740.869.4374 [www.willowwoodco.com](http://www.willowwoodco.com)  
Patente [www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents](http://www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents)



Ohio Willow Wood Company B.V.  
Keizersgracht 62/64  
1015 CS Amsterdam  
Países Bajos

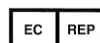

PN-1114-H SPA 24 DE ENERO DE 2014